

# STD検査キット内容説明書

(淋病、クラミジア、梅毒、カンジタの4項目検査)

## <検査手順>

1から6の手順で行ってください

### ① 同梱物の確認

申込書(2枚複写)、検体採取キット、返信用封筒、説明書(本書)

### ② 申込書の記入



IDとパスワード、検査日を検査申込書に記入していただきます。プライバシー重視のため弊社内でもご購入されたとのお客様が受けた検査であるか認識できません。

\*匿名検査のためお名前の代わりにご自身で決めていただいたID(数字8桁)をご記載ください。



\*申込書は2枚複写(提出用・保管用)となります。

### ③ 検体の採取

#### 女性

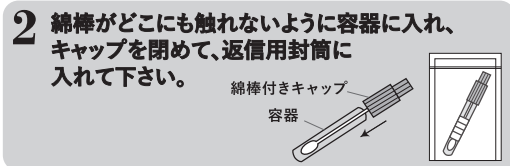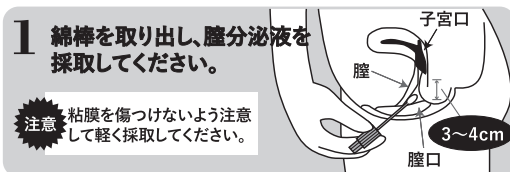

#### 男性

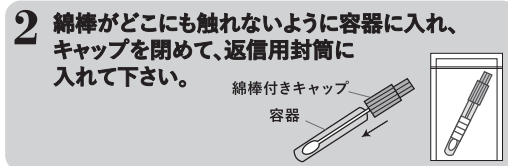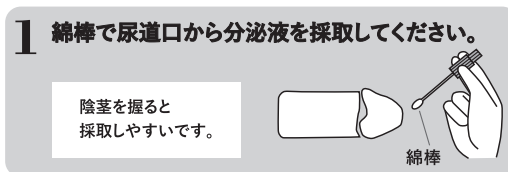

★検体を採取したキットには申込書に書かれたID(数字8桁)をご記入ください。  
(ご記入場所はどちらでも結構です)

### ④ 検体の提出

検体と申込書(提出用)を同封の返信用封筒に入れポストに投函ください。切手は必要ありません。

### ⑤ 結果の確認方法

検査結果は検体到着後約1週間~10日程で下記URLまたはQRコードよりアクセスしご確認いただけます。その際ご記入いただきましたID、パスワード、検査日の情報のご入力が必要になりますので申込書の控えは大切に保管ください。

\*ログインできない場合は検査が完了していません。

\*配送後10日以上たってもログインできない場合は下記へお問い合わせください。

検査結果 <https://result.avex-clinic.jp>

お問合せ先 [info@avex-clinic.jp](mailto:info@avex-clinic.jp)



### ⑥ 陽性がでたら

クリニックまでご相談ください。陰性の場合でも定期的な検査を推奨いたします。

医療法人社団 NYC理事長 avex bldg.clinic

東京都港区南青山3丁目1番30号エイベックスビル1F

オンライン診療

